

# Galileo® Med PT im Überblick



## Panel für Ihre interaktive Anwendung

Mit großem Display zur Visualisierung des kompletten Übungsablaufs.

Auf dem großzügigen HDTV-Monitor lässt sich der komplette Ablauf der Übungen anhand von Videos in Echtzeit verfolgen. Das autarke Standpanel ist verfügbar für ausgewählte Gerätemodelle mit Steuerung über das Bedienteil des Galileo Standgerätes.

## Funktionsumfang

### Trainingsmodi

- **Freie Übungen:** In diesem Modus wählt der Anwender selbst einzelne Übungen aus themenbezogenen Übungsgruppen (Beispiel: „Warm Up“) nacheinander aus. Die vorgegebenen Parameter kann er bei jeder Übung ändern.
- **Auto-Training:** In diesem Modus ist der komplette Trainingsplan inklusive Gesamtzeit und Pausen vorgegeben. In den Pausenzeiten sieht der Anwender bereits eine Vorschau auf die nächste Übung und kann sich auf diese vorbereiten.

### Intensitätsstufen

- Es stehen bis zu 6 Intensitätsstufen zur Auswahl.

### Wobbel-Funktion

- Die Wobbel-Funktion kann jederzeit individuell in der Intensitätsstufe leicht, mittel oder schwer zugeschaltet werden.

### Einfache Updates

- Die Software ist modular aufgebaut, Aktualisierungen können einfach vorgenommen und weitere Module beispielsweise in Form neuer Übungsgruppen nachgerüstet werden.

### Zeitkonto

- Eine Zugangsbeschränkung erreichen Sie durch die Chipkarten oder die optionale RFID-Funktion. Über die mitgelieferte PC-Software definieren Sie, ob Ihre Kunden mit oder ohne Zeitkonto trainieren können.

### Personalisierte Therapiepläne

- Neben freien Übungen und Auto-Training haben Sie die Möglichkeit, einen individuell auf Ihre Patienten zugeschnittenen, festen Therapieplan zu erstellen. Diesen können Sie durch die Zuschaltung des Zufallsgenerators für die Übungsauswahl abwechslungsreicher gestalten. Die Verwendung einer Chipkarte oder der optionalen RFID-Funktion ist hierzu erforderlich.

### Eigenes Bildmaterial

- Darüber hinaus können Sie eigene Bilder, beispielsweise mit Werbung oder allgemeinen Informationen, zur Überbrückung von Leerlaufzeiten einspielen.

VIDEOGESTÜTZTE THERAPIE AUF GROSSEM HDTV-MONITOR.  
INTUITIVE STEUERUNG DIREKT ÜBER DAS GALILEO BEDIENTEIL.  
KOMPLETTE CHIPKARTEN- UND OPTIONALE RFID-UNTERSTÜTZUNG  
BEI MED PT.



Galileo Med PT

## Die Oberfläche

1. Therapieplan
2. Übungsvideo
3. Übungsparameter (Übungsdauer, Frequenz, Fußposition)
4. Wobbel-Funktion
5. Muskelgruppen-Trainingschwerpunkte
6. Fortschrittsbalken und verbleibende Übungsdauer
7. Beschreibungstext zur Übung
8. Auswahl Therapieziel



Galileo Med PT hilft Ihnen dabei, Ihre Kunden oder Mitarbeiter zu animieren und dauerhaft zu binden, ohne dass nach der individuellen Einweisung weitere Personalkosten anfallen müssen. Aufgrund der Vielzahl an Übungsgruppen und Übungen kommt bei Anwendungen mit Galileo Med PT kaum Langeweile auf. Der Patient kann entweder die Übungsgruppe und damit das Ziel der Anwendung von Galileo jederzeit anpassen oder ändern. Alternativ geben Sie einen kompletten Therapieplan vor. Für die „klassische“ 1 zu 1-Therapie mit individueller Therapeuten-Betreuung kann Galileo Med PT entweder ganz ausgeschaltet oder aber im Standby-Modus als Werbefläche genutzt werden.

## Optional erhältlich

### 1 Echtzeituhr

- Konfiguration von Tages-, Wochen- und Monatslimits für Galileo Med Fit PT Bundle möglich
- Einschränkungen bezüglich der Nutzungshäufigkeit einstellbar

### 2 Externe Freigabe (IO-Modul)

- Steuerung und Nutzung eines Galileo Gerätes über ein bereits vorhandenes System (z.B. RFID, Chip bzw. andere Schlüssel- und Bezahlsysteme) zur Zugangskontrolle
- Anschluss entsprechender Drittanbieter-Terminals an Galileo Basiseinheit möglich; Aktivierung/Deaktivierung über Schalteingang

# Galileo® – Liste für Funktionen & Optionen

Beachten Sie bitte die Icons für entsprechende Funktionen, Optionen oder Geräte.




## GALILEO® MEDIZIN- ZULASSUNG

CE0123-Kennzeichnung (Medizin-  
gerät) gemäß Richtlinie 93/42/EWG



## GALILEO® SILENT

Geräuscharmer Betrieb

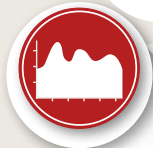

## GALILEO® WOBBEL

Training mit sich zufällig ändernden  
Frequenzen



## GALILEO® SMART COACHING

Trainingskontrolle



## GALILEO® SMART SENSE

Integrierte Messfunktion



## GALILEO® CHIP

Zugangskontrolle, Zeitkonten und  
Trainingspläne



## GALILEO® RFID

Zugangskontrolle, Zeitkonten und  
Trainingspläne



## GALILEO® MANO 30 HANTELN

Speziell für Arm/Schulter/Hand



## GALILEO® MANO 20 HANTELN

Speziell für Arm/Schulter/Hand



## GALILEO® PERSONAL TRAINER

Visualisierung des Trainings inkl. TPM



## GALILEO® FARBE

Farbvarianten auf Anfrage  
(Schwarz, Rubinrot, Signalblau etc.)



## GALILEO® TRAININGS- PLAN MANAGER / TPM

Software für Trainingspläne



integriert



optional

Beispiel:

